



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



LITHUANIA

Naudojimo instrukcija FSG įspaudų putos

1. Numatyta paskirtis

Ortopedinių batų technologijos specialistai, darydami pėdų atspaudus, naudoja FSG įspaudų putas. Remiantis gydytojo diagnoze, ortopedijos technikas sukuria pėdos atspaudą. Šį atspaudą jis gali apdoroti įvairiais metodais. Jis gali pagaminti modelį naudodamas gipsą ar liejimo dervą arba naudodamasis įspaudu tiksliai nustatyti pėdos anatomią ar iškilią pėdos vietas. Taip pat yra galimybė nuskaityti pėdos įspaudą ir toliau jį apdoroti naudojant specialią programinę įrangą. Turi būti laikomasi skaitytuvo gamintojo ir programinės įrangos tiekėjo pateiktos informacijos. Daugeliu atvejų yra pagaminamas įdėklas, tačiau yra ir kitų variantų, kaip antai individualių batų, pagamintų pagal užsakymą, gamyba. Derinys su kitais produktais nėra numatytas.

2. Sandėliavimas

FSG įspaudų putos turi būti laikomos sausoje vietoje. Ideali patalpos sąlygos yra temperatūra nuo 18 °C iki 24 °C, santykinė oro drėgmė nuo 55 proc. iki 65 proc. Jokios atsakomybės už gaminio kokybę ir funkcionalumą neprisiimame, jei jis laikomas ne pagal šias sąlygas. Pažeistas ar drėgnas putų dėžės reikia išrūšiuoti. Siuntos dėžės reikia laikyti vertikaliai, gulima padėtis nenumatyta. Daugiausia galima sukrauti viena ant kitos 4 dėžutes.

3. Naudojimas

FSG įspaudų putas gali naudoti tik apmokyti specialistai. Savo apsaugai naudotojas turi mėvėti vienkartinę pirštines. Turi būti laikomasi darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių. FSG įspaudų putos tinka tik išoriniam ir vienkartiniam naudojimui. Pacientas gali padėti pėdą ant putų plokštės tik vieną kartą. FSG įspaudų putos turi būti sausas ir nepažeistos. Paciento pėda turi būti švari, be kremo, nepažeista ir neužkrėsta. Jei reikia, pėdai apdengti turi būti naudojama sterili plėvelė ar žaizdų tvarstis. Venkite FSG įspaudų putų ar jų likučių sąlyčio su gleivine. Prieš naudojimą reikia įsitikinti, kad naudojamas variantas yra tinkamas pagal numatytą paskirtį. Apmokytas specialistas nustato reikiamas įspaudų putas, remdamasis jų pritaikymu. FSG įspaudų putų dangtelis turi būti atidarytas ir gulėti ant tvirto, horizontalaus ir lygaus paviršiaus. Naudotojas turi taip nukreipti pėdą, kad būtų gaunamas centruotas įspaudas. Jei įspaudas daromas, kai yra pilnutinė apkrova (stovint), reikia užtikrinti paciento saugumą, esant reikalui, jį prilaikyti. Patikrinkite įspaudų tinkamumą, jei reikia, pakartokite, naudodami naują įspaudų putų porą. Dėl higienos priežasčių likučius nuo pėdos reikia nedelsiant pašalinti. FSG įspaudų putas ir atspaudą laikykite atskirai.

4. Naudojimo trukmė

FSG įspaudų putos negali būti laikomos ilgiau kaip 36 mėnesius. Spalvos pokyčiai neturi įtakos putų funkcijai. Ant gaminio pakuotės įspauda data rodo tinkamumo laiką. Po šios datos putos nebegerai būti naudojamos. Datos antspaudas taip pat yra ir partijos numeris. Data ant gabenimo vieneto pakuotės etiketės po „smėlio laikrodžio“ simboliu. rodo galiojimo datą (mėnesį). Po šios datos putos gali būti nebenaudojamos. LOT data taip pat yra siuntos numeris.

5. Šalinimas

FSG įspaudų putos šalinamos kaip likutinės atliekos, kartonas atidedamas makulatūros perdirbimui. Užterštos įspaudų putos ir galbūt pakuotės turi būti šalinamos atsižvelgiant į užteršimo tipą ir vietas bei įstatymų numatytas atliekų šalinimo taisykles.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de