



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



MONTENEGRO



Instrukcija za upotrebu FSG pjene za uzimanje otiska

1. Odredba o svrsi:

FSG pjena za uzimanje otiska potrebna je stručnom osoblju u tehnologiji izrade ortopedskih cipela, kako bi se napravili otisci stopala. Na osnovu dijagnoze ljekara ortopedski tehničar pravi negativ stopala. Ortopedski tehničar onda ovaj negativ može dalje da obrađuje pomoću različitih postupaka. Od gipsa ili tečne smole može da izradi pozitiv, ili da pomoću otiska utvrdi preciznu anatomiju ili istaknuta mjesta na stopalu. Takođe postoji mogućnost da se otisak stopala skenira i da se dalje obrađuje pomoću specijalnog softvera. Pri tome mora da se obrati pažnja na podatke proizvođača skenera i isporučioća skenera. U većini slučajeva se izrađuje uložak, ali postoje i druge mogućnosti, kao što je na primer izrada individualne cipele po mjeri. Kombinacija s drugim proizvodima nije predviđena.

2. Skladištenje:

FSG pjena za uzimanje otiska mora da se skladišti na suvom mjestu, idealni sobni uslovi su temperature između 18° i 24° C i relativna vlažnost vazduha između 55% i 65%. Za kvalitet proizvoda i njegovu funkcionalnost ne može da se preuzme nikakva odgovornost, ako isti nije skladišten pod ovim uslovima. Oštećene ili mokre kutije s pjenom za uzimanje otiska moraju da se izdvoje. Ambalažne kutije moraju da se skladište uspravno, položeno skladištenje nije predviđeno. Maksimalno 4 kutije smiju da se slože jedna na drugu.

3. Primjena:

FSG pjenu za uzimanje otiska smije da primjenjuje samo edukovano stručno osoblje. Korisnik bi pri tome, radi vlastite zaštite, trebalo da nosi rukavice za jednokratnu upotrebu. Odredbe za zaštitu na radu moraju da se poštuju. FSG pjena za uzimanje otiska namijenjena je samo za spoljašnju primjenu i za jednokratnu upotrebu. Pacijent samo jednom smije da zgazi na podlogu od pjene. FSG pjena za uzimanje otiska mora da bude suva i neoštećena. Stopalo pacijenta mora da bude čisto, nenamazano kremom i bez povreda i infekcija. Po potrebi mora da se koristi sterilna folija ili zavoj za rane radi pokrivanja stopala. Mora da se izbjegne kontakt FSG pjene za uzimanje otiska ili njenih istrošenih dijelova sa sluzokožama. Prije upotrebe mora da se utvrdi da je upotrebljena varijanta adekvatna vrsta za planiranu primjenu. Edukovani stručni tehničar određuje neophodnu pjenu za otisak u skladu sa njenom primjenom. FSG pjena za uzimanje otiska mora da bude otklopljena i položena na čvrstu, horizontalnu i ravnu površinu. Korisnik mora da postavi stopalo tako da otisak ostane u sredini. Ako se ostavlja otisak pod punim opterećenjem (iz stojećeg položaja) morate se pobrinuti da pacijent sigurno stoji, odnosno da se podupre. Provjerite upotrebljivost otiska, po potrebi ponovite sa novim kompletom pjene za uzimanje otiska. Ostaci pjene na stopalu iz higijenskih razloga moraju odmah da se uklone. FSG pjenu za uzimanje otiska sa uzetim otiskom skladištite zasebno.

4. Rok trajanja:

FSG pjena za uzimanje otiska ne smije da se skladišti duže od 36 mjeseci. Promjene boje nemaju nikakav uticaj na funkciju pjene. Datum koji je utisnut na ambalaži proizvoda prikazuje datum roka trajanja. Nakon tog datuma pjena ne smije više da se koristi. Utisnuti datum je takođe broj šarže. Datum na naljepnici pakiranja jedinice za otpremanje nakon simbola „sat“ prikazuje datum isteka (mjesec). Nakon ovog datuma, pjena se više ne može koristiti. Datum LOT je i broj serije.

5. Odlaganje na otpad:

FSG pjena za uzimanje otiska odlaze se na otpad uz ostalo smeće, kartonska ambalaža se predaje na reciklažu starog papira. Kontaminirana pjena za uzimanje otiska i eventualno ambalaža moraju da se odlože na otpad onako kako nalaže vrsta nečistoće, zatim lokalni kao i zakonski propisi za odlaganje na otpad.

